



## FIȘA TEHNICĂ (PROSPECT) KLINTENSIV SERVETELE DEZINFECTANTE®

**KLINTENSIV SERVETELE DEZINFECTANTE**® sunt impregnate cu o soluție dezinfectantă de nivel înalt, gata de utilizare, pentru orice tip de suprafață.

### CARACTERISTICI:

- ✓ Au **acțiune rapidă**
- ✓ Sunt ideale pentru **orice tip de suprafață**
- ✓ Spectru complet de **acțiune biocidă**



**1. Conținut de substanță activă :** Clorura de didicildimetilamoniu 0.34% (Nr. CAS: 7173-51-5; Nr. CE: 230-525-2) și saruri cuaternare de amoniu, benzil C12-18, alchildimetil, cloruri 0.09% (Nr. CAS: 68391-01-5; Nr. CE: 269-919-4).

### 2. Tipul de produs biocid conform H.G. 956/2005:

- Grupa principală 1: Dezinfectante și produse biocide
- Tip de produs: 2 – dezinfectant pentru suprafețe cu aplicare prin ștergere, în domeniul medical, industrial, instituțional, colectivități, casnic.
- Categoria de utilizatori: profesionali, industriali, populație.

### 3. Recomandări referitoare la utilizare:

Produsul circulă însoțit de fișa tehnică (prospect). Citiți instrucțiunile înainte de folosire ! Respectați standardele (timp de acțiune, specificații tehnice, etc) și ordinea operațiilor de curățare, dezinfecție, dezinsecție și deratizare !

#### 3.1. Norma minimă de consum :

Tip dezinfecție	Mod folosire	Norma minimă de consum m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>
Suprafețe	ștergere	1 sevetel/25 cm <sup>2</sup>

**3.2. KLINTENSIV SERVETELE DEZINFECTANTE**® se utilizează în dezinfecția suprafețelor în domeniul medical, astfel :

**Tip de produs: 2 – dezinfectant pentru suprafețe, prin ștergere în domeniul medical, industrial, instituțional, colectivități, casnic.**

Aria de aplicare : Sanitar (medical)	Timp de acțiune	Nivelul dezinfecției	Procedura
Dezinfecția suprafețelor cu grad mic de contaminare: -pardoseli, scări, lambriu, uși, saloane de operații, săli de			Se curăță murdăria grosieră înainte de dezinfecție. Se șterge suprafața cu servetelul dezinfectant.



<p>așteptare din spitale, cabinete medici, cabinete de consultații, laboratoare de analize medicale, etc.;</p> <p>-obiecte sanitare: cabine de dus, covoare, căzi de baie, chiuvete, vase WC, pisoar, vase de pat, baloane pisoar, containere pentru deșeuri;</p> <p>-mese de operații, paturi, cărucioare, containere, cărucioare de transport bolnavi, ambulante;</p> <p>-dezinfecția instalațiilor de climatizare</p>	60 minute	Nivel înalt	
<p>Dezinfecția de nivel înalt (acțiune sporicidă) a suprafețelor:</p> <p>- săli de operație;</p> <p>- săli de nașteri;</p> <p>- cabinete de consultații;</p> <p>- săli de primire urgență (UPU)</p>	60 minute	Nivel înalt	Se curăță murdăria grosieră înainte de dezinfecție. Se șterge suprafața cu laveta dezinfectanta.
<p>Dezinfecția suprafețelor contaminate cu fluide:</p> <p>- sânge;</p> <p>- puroi;</p> <p>- salivă;</p>	60 minute	Nivel înalt	Ștergeți suprafața infectată cu servetele dezinfectante de cel puțin 2 ori.
<p>Ustensile infectate:</p> <p>- diverse obiecte de mic inventar;</p> <p>- sticlărie de laborator;</p>	60 minute	Nivel înalt	Se curăță murdăria grosieră înainte de dezinfecție. Se șterge suprafața cu laveta dezinfectanta.
<p>Dezinfecția curentă a suprafețelor de orice tip din instituții publice sau private și colectivități (birouri, cămine, hoteluri, pensiuni, grădinițe, școli, cazărmi, penitenciare, filtre sanitare, frizerii, prestatori de servicii de curățenie, dezinfecție, prestatori de servicii de relaxare sau înfrumusețare, etc.)</p>	60 minute	Nivel înalt	Se curăță murdăria grosieră înainte de dezinfecție. Se șterge suprafața servetelele dezinfectante KLINTENSIV și se lasă să acționeze timpul precizat.

**Produsul nu se folosește la prepararea și/sau transportul alimentelor pentru oameni/animale !**

**În caz de contact accidental al produsului cu suprafețe care iau contact cu alimente se clătește din abundență cu apă !**

**În caz de contact al produsului cu hrană/alimente pentru oameni sau animale, produsul contaminat se aruncă, nu se îngerează !**

#### **4. Eficacitate biocidă:**

##### **4.1. Produsul KLINTENSIV SERVETELE DEZINFECTANTE® prezintă:**

- activitate bactericidă conform : SR EN 1276, SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 14561;
- activitate fungicidă, conform: SR EN 13624, SR EN 13697, SR EN 14562;



- *activitate levurică conform: SR EN 1650, SR EN 13624, SR EN 13697, SR EN 14562;*
- *activitate micobacterică (inclusiv tuberculică) conform: SR EN 14348;*
- *activitate virucidă, conform: SR EN 14476;*
- *activitate sporicidă, conform : SR EN 13704;*

#### 4.2. Detaliere eficacitatea biocidă a produsului KLINTENSIV SERVETELE DEZINFECTANTE

Activitate biocidă	Metoda de testare/Protocol de testare	Specia/organisme	Timpi de acțiune
Bactericida faza2/etapa1	SR EN 1276 <i>In conditii de murdarie</i>	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Escherichia coli Enterococcus hirae	5 minute
Bactericida faza2/etapa1	SR EN 13727 <i>In conditii de murdarie</i>	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	5 minute
Bactericida faza2/etapa2	SR EN 13697 <i>In conditii de murdarie</i>	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Escherichia coli Enterococcus hirae	5 minute
Bactericida faza2/etapa2	SR EN 14561 <i>In conditii de murdarie</i>	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	15 minute
Fungicida faza2/etapa1	SR EN 13624 <i>In conditii de curatenie</i>	Aspergillus niger	15 minute
Fungicida faza2/etapa2	SR EN 13697 <i>In conditii de murdarie</i>	Aspergillus niger	30 minute
Fungicida faza2/etapa2	SR EN 14562 <i>In conditii de murdarie</i>	Aspergillus niger	60 minute
Levuricida faza2/etapa1	SR EN 1650 <i>In conditii de murdarie</i>	Candida albicans	5 minute
Levuricida faza2/etapa1	SR EN 13624 <i>In conditii de murdarie</i>	Candida albicans	5 minute
Levuricida faza2/etapa2	SR EN 13697 <i>In conditii de murdarie</i>	Candida albicans	5 minute
Levuricida faza2/etapa2	SR EN 14562 <i>In conditii de murdarie</i>	Candida albicans	10 minute
Micobactericida, tuberculocida faza2/etapa1	SR EN 14348 <i>In conditii de murdarie</i>	Mycobacterium avium Mycobacterium terrae	60 minute
Sporicida Faza2/etapa1	SR EN 13704 <i>In conditii de curatenie</i>	Bacillus subtilis	60 minute
Virucida faza2/etapa1	SR EN 14476 <i>In conditii de murdarie</i>	Poliovirus Adenovirus Murine Norovirus	5 minute

Compatibilitate: produsul este compatibil cu orice tip de material: ciment, mozaic, linoleum, gresie, lemn lustruit, faianta sau vopsea de ulei, ceramica, portelan, sticlărie de laborator, plexiglas sau acrilice, cauciuc, metal, fibra optica, etc.

Eficiența se menține în prezența materiilor organice proteice (testările de eficacitate biocidă au fost făcute în condiții de murdărie).

Produsul utilizat nu este coroziv (inhibitorii de coroziune limitează efectul coroziv al produsului). Este indicat a se evita contactul produsului **KLINTENSIV SERVETELE DEZINFECTANTE** cu alte produse.



## 5. Ambalare, transport și livrare:

Produsul se ambalează în pachete din folie specială de câte 80 buc servetele dezinfectante/pachet care se etichetează și se sigilează.

Se depozitează în spații închise, curate, bine aerisite, la temperaturi între + 5 ° C la + 30 ° C.

Fiecare lot de livrare va fi însoțit de documentul de certificare a calității întocmit conform dispozițiilor legale în vigoare, respectiv declarația de conformitate întocmită pe baza fișelor tehnice, a buletinelor de analiză și avizul sanitar.

Transportul se face cu mijloace de transport acoperite. Temperatura de păstrare: 5-30 °C.

Fiecare livrare va fi însoțită de documente de certificare a calității/declarație de conformitate.

Termen de valabilitate: În condițiile de depozitare menționate produsul are valabilitate 36 de luni de la data fabricației/data expirării.

## 6. Precauții și recomandări :

Se vor respecta normele de protecție a muncii privind regimul de manipulare și utilizare specifice produselor biocide ;

În caz de ingestie accidentală se va solicita sfatul medicului prezentând eticheta produsului;

A nu se pulveriza în prezența curenților puternici de aer.

GHS07

Cuvânt de avertizare : Atenție !



Fraze de pericol :

H 302 – Nociv în caz de înghițire

Fraze de precauție :

P273 – Evitați dispersarea în mediu.

P301+P312 În caz de înghițire: sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P305 + P351 + P338 – În caz de contact cu ochii clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P319 – Colectați scurgerile de produs

Acest produs este destinat pentru uz profesional, industrial și casnic și se va folosi de către personal calificat, cu cunoașterea normelor de siguranță în domeniu și după citirea instrucțiunilor de utilizare în cazul personalului nespecializat. Se va utiliza cu mănuși de protecție. Se recomandă a fi utilizat în încăperi bine aerisite și ventilate. Produsul va fi păstrat închis, în ambalajul original, la răcoare și la loc uscat. Este indicat a se evita contactul **KLINTENSIV SERVETELE DEZINFECTANTE** cu alte produse cu activitate biocidă, sau cu alți detergenți în special cu cei care conțin surfactanți anionici sau aldehide.

Intocmit,  
Ing. Chim. Ioana Popa

Aprobat,  
Dir. Gen. Cristian Stanciu

# Klintensiv<sup>®</sup>

Dezinfectanți de uz profesional pentru  
suprafețe și instrumentar medical



Adresa: Sos. Alexandriei 544, Bragadiru, Ilfov

Tel: 0749.550.140

Fax: 021/44.81.487

Email: [office@klintensiv.com](mailto:office@klintensiv.com)

Web: [www.klintensiv.com](http://www.klintensiv.com)

