



PROSPECT KLINTENSIV DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT®

KLINTENSIV DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT® este un dezinfectant de nivel mediu, concentrat, pentru suprafețe, instrumentar și aeromicroflora..

- ✓ Asigura o **dizolvare rapidă a reziduurilor proteice și a fluidelor organice**
- ✓ **Nu conține iod, aldehide, fenoli, clor**

1. Conținut de substanță activă :

- 1,3% Poli(hexametilenbiguanidă), Polimer, 91403-50-8
- 2,8% Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchil dimetil, cloruri | 269-919-4 | 68391-01-5
- 18% Clorură de didecildimetilamoniu | 230-525-2 | 7173-51-5 |.

2. Tipul de produs biocid conform H.G. 956/2005:

- Grupa principală 1: Dezinfectante și produse biocide
- Tip de produs: 2 – dezinfectant pentru suprafețe, instrumentar și aeromicroflora cu aplicare prin ștergere, imersie, pulverizare sau nebulizare (ceață rece) în domeniul medical, industrial, instituțional, colectivități, casnic.
- Categoria de utilizatori: profesionali, industriali, populație

3. Recomandări referitoare la utilizare:

Produsul circulă însoțit de fișa tehnică (prospect). Citiți instrucțiunile înainte de folosire ! Respectați standardele (timpuri de acțiune, specificații tehnice, etc) și ordinea operațiilor de curățare, dezinfecție, dezinsecție și deratizare !

3.1. Norma minimă de consum :

Tip dezinfecție	Tabel dozaj soluție lucru	Mod folosire	Norma minimă de consum (ml sol GDL/ m ² sau m ³)
Suprafețe	2 %	ștergere sau pulverizare	10 mililitri/metru pătrat (ștergere și pulverizare)
Aeromicroflora Instrumentar		nebulizare imersie	10 mililitri/metru cub (nebulizare/ceață rece) acoperirea instrumentarului în cuva

*În anumite condiții (focare de epidemie, epizootie, suprafețe poroase, spații insalubre/fără curățenie, reglaj echipamente de dezinfecție, etc) norma minimă de consum se dublează . Pentru dezinfecția prin pulverizare în calculul suprafețelor se va utiliza coeficientul de 2,5 în conformitate cu Ordinului Ministrului Agriculturii și Alimentației Publice nr. 76-PT/1981.

3.2. KLINTENSIV DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT se utilizează curățarea și dezinfecția suprafețelor, instrumentarului și aeromicroflorei, în domeniul medical, astfel : **Se diluează la 2%, adică 20 ml produs, peste care se adaugă apa până la 1L pentru a se obține soluția de lucru.**





- Tip de produs: 2 – dezinfectant pentru suprafețe și instrumentar, aeromicroflora, cu aplicare prin ștergere, imersie, pulverizare sau nebulizare (ceață rece) în domeniul medical

Dezinfecția în domeniul sanitar				
Aria de aplicare : Sanitar (medical)	Diluția	Timp de acțiune	Nivelul dezinfecției	Procedura
Dezinfecția suprafețelor cu grad mic de contaminare: -pardoseli, scări, lambriu, uși, saloane de operații, săli de așteptare din spitale, cabinete medici, cabinete de consultații, laboratoare de analize medicale, etc.; -obiecte sanitare: cabine de dus, covoare, căzi de baie, chiuvete, vase WC, pisoar, vase de pat, baloane pisoar, containere pentru deșeuri; -mese de operații, paturi, cărucioare, containere, cărucioare de transport bolnavi, ambulanțe; -dezinfecția instalațiilor de climatizare	2 %	60 minute	Nivel mediu	Se curăță murdăria grosieră înainte de dezinfecție. Se șterge suprafața cu laveta sau mopul înmuiat în soluția dezinfectantă sau prin pulverizare/nebulizare. La dezinfecția suprafețelor prin pulverizare (vermorel sau pompă cu presiune), norma de consum este de minim 10 ml./m.p. (în funcție de suprafață). În acest caz, ulterior operației, aerisiți bine încăperile!
Dezinfecția suprafețelor contaminate cu fluide: - sânge; - puroi; - salivă;	2 %	60 minute	Nivel mediu	Ștergeți suprafața infectată cu o lavetă înmuiată în soluție dezinfectantă sau pulverizați soluția dezinfectantă cu ajutorul unei pompe cu presiune peste suprafața contaminată și apoi ștergeți cu o lavetă umedă.
Ustensile infectate: - diverse obiecte de mic inventar; - sticlărie de laborator;	2 %	60 minute	Nivel mediu	Se imersează ustensilele în soluție și după timpul de acțiune se spală cu apă sterilă.
Instrumentar medical din categoria *critice*, din orice tip de material ; Predezinfecția instrumentarului ce va fi sterilizat.	2 %	60 minute	Nivel mediu	Se curata instrumentarul de murdaria grosiera apoi se imersează în soluție și după timpul de acțiune, se spală cu apă sterilă .
Dezinfecția suprafețelor pe cale aeriană (prin pulverizare sau nebulizare) în focare epidemiologice (situații	2 Se dubleaza			Se aplica soluția de dezinfectantă prin pulverizare sau nebulizare (ceață rece) în focare



speciale) înainte de instituirea măsurilor de curățare sau curățenie;	norma de consum	60 minute	Nivel mediu	epidemiologice înainte de instituirea măsurilor de curățare sau curățenie. Operația de dezinfecție prin pulverizare sau nebulizare se face în absența persoanelor din încăperi/spații închise, urmată de aerisire. Purtați echipament individual de protecție (mască, manusi, ochelari, halat).
Dezinfecția curentă a suprafețelor de orice tip și aeromicroflorei din instituții publice sau private și colectivități (birouri, cămine, hoteluri, pensiuni, grădinițe, școli, cazărmi, penitenciare, filtre sanitare, frizerii, prestatori de servicii de curățenie, dezinfecție, prestatori de servicii de relaxare sau înfrumusețare, etc.)	2 %	60 minute	Nivel mediu	Se curăță murdăria grosieră înainte de dezinfecție. Se șterge suprafața cu laveta sau mopul înmuiat în soluția dezinfectantă sau prin pulverizare. La dezinfecția aeromicroflorei prin pulverizare (vermorel sau pompă cu presiune), norma de consum este de minim 10 ml./m.c. (în funcție de volumul incaperii). Operația de dezinfecție prin pulverizare sau nebulizare se face în absența persoanelor din încăperi, urmata de aerisire.

Produsul nu se folosește la prepararea și/sau transportul alimentelor pentru oameni/animale !

In caz de contact accidental al produsului cu suprafețe care iau contact cu alimente se clătește din abundență cu apă !

In caz de contact al produsului cu hrana/alimente pentru oameni sau animale, produsul contaminat se arunca, nu se îngerează !

4. Eficacitate biocidă:

4.1. Produsul KLINTENSIV DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT prezintă:

- activitate bactericidă conform : SR EN 13727, SR EN 13697, SR EN 14561;
- activitate fungică, conform: SR EN 13697;
- activitate levurică conform: SR EN 13624, SR EN 13697, SR EN 14562;
- activitate virucidă, conform: SR EN 14476;

4.2. Detaliere eficacitatea biocidă a produsului KLINTENSIV DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT:

Activitate biocidă	Metoda de testare/Protocol de testare	Specia/organisme	Concentrații	Timpi de acțiune
Bactericida faza2/etapa1	SR EN 13727 <i>In conditii de murdarie</i>	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus	2%	5 minute



		Enterococcus hirae		
Bactericida faza2/etapa2	SR EN 13697 <i>In conditii de murdarie</i>	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Escherichia coli Enterococcus hirae	2%	5 minute
Bactericida faza2/etapa2	SR EN 14561 <i>In conditii de murdarie</i>	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae	2%	5 minute
Fungicida faza2/etapa2	SR EN 13697 <i>In conditii de murdarie</i>	Aspergillus niger	2%	60 minute
Levuricida faza2/etapa1	SR EN 13624 <i>In conditii de murdarie</i>	Candida albicans	2%	5 minute
Levuricida faza2/etapa2	SR EN 13697 <i>In conditii de murdarie</i>	Candida albicans	2%	5 minute
Levuricida faza2/etapa2	SR EN 14562 <i>In conditii de murdarie</i>	Candida albicans	2%	5 minute
Virucida faza2/etapa1	SR EN 14476 <i>In conditii de murdarie</i>	Poliovirus Adenovirus Murine Norovirus	2%	5 minute

Compatibilitate: produsul este compatibil cu orice tip de material: ciment, mozaic, linoleum, gresie, lemn lustruit, faianta sau vopsea de ulei, ceramica, portelan, sticlărie de laborator, plexiglas sau acrilice, cauciuc, metal, fibra optica, etc..

Eficiența se menține în prezența materiilor organice proteice (testările de eficacitate biocidă au fost făcute în condiții de murdărie).

Produsul utilizat nu este coroziv (inhibitorii de corozie limitează efectul coroziv al produsului). Este indicat a se evita contactul produsului cu alte produse.

5. Ambalare, transport și livrare:

Produsul se ambalează în flacoane de polietilenă de înaltă densitate de 1000/2000/5000 ml e, care se etichetează și se sigilează.

Se depozitează în spații închise, curate, bine aerisite, la temperaturi între + 5 ° C la + 30 ° C.

Fiecare lot de livrare va fi însoțit de documentul de certificare a calității întocmit conform dispozițiilor legale în vigoare, respectiv declarația de conformitate întocmită pe baza fișelor tehnice, a buletinelor de analiză și avizul sanitar.

6. Precauții și recomandări :

Se vor respecta normele de protecție a muncii privind regimul de manipulare și utilizare specifice produselor biocide ;

În caz de ingestie accidentală se va solicita sfatul medicului prezentând eticheta produsului;

A nu se pulveriza în prezența curenților puternici de aer.

Pictograme pentru pericole



GHS07

Atenție !



GHS09

Cuvânt de avertizare :

Klintensiv®

Dezinfectanți de uz profesional pentru
suprafețe și instrumentar medical



Adresa: Sos. Alexandriei 544, Bragadiru, Ilfov

Tel: 0749.550.140

Fax: 021/44.81.487

Email: office@klintensiv.com

Web: www.klintensiv.com

Fraze de pericol :

H 302 Nociv în caz de înghițire

H 318 Provoacă leziuni oculare grave

H 336 Poate provoca somnolență sau amețea

H 410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Fraze de precauție :

P 261 Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceapa/vaporii/spray-ul.

P 262 Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

P 273 Evitați dispersarea în mediu.

P 280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P301+ P312 În caz de înghițire: sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P391 – Colectați scurgerile de produs

Acest produs este destinat pentru uz profesional, industrial și casnic și se va folosi de către personal calificat, cu cunoașterea normelor de siguranță în domeniu și după citirea instrucțiunilor de utilizare în cazul personalului nespecializat. Se va utiliza cu mănuși de protecție. Se recomandă a fi utilizat în încăperi bine aerisite și ventilate. Produsul va fi păstrat închis, în ambalajul original, la răcoare și la loc uscat. Este indicat a se evita contactul KLINTENSIV DETERGENT DEZINFECTANT CONCENTRAT cu alte produse cu activitate biocidă, sau cu alți detergenți în special cu cei care conțin surfactanți anionici sau aldehide.

Intocmit,
Ing. Chim. Ioana Popa

Aprobat,
Dir. Gen. Cristian Stanciu

Klintensiv[®]

Dezinfectanți de uz profesional pentru
suprafețe și instrumentar medical



Adresa: Sos. Alexandriei 544, Bragadiru, Ilfov

Tel: 0749.550.140

Fax: 021/44.81.487

Email: office@klintensiv.com

Web: www.klintensiv.com

