

ETICHETA PRODUSULUI

KLINTENSIV DEZINFECTANT INSTRUMENTAR

COMPOZIȚIA CHIMICĂ la 100 g produs :

Substanța activă:

- 1,3 g Polihexametilenbiguanidă – nr. CAS 91403 – 50 – 8 (concentrație produs 20%)
- 2,8 g Compuși cuaternari de amoniu, benzil-C12-18-alchilidimetil, cloruri – nr. CAS 68391 – 01 – 5 (concentrație produs 50%)
- 18 g Clorură de didecildimetilamoniu – nr. CAS 7173 – 51 -5 (concentrație produs 50%)
- Alte ingrediente: surfactanți, inhibitor de coroziune, parfum.

Număr aviz sanitar: 2267BIO/02/12.24

KLINTENSIV DEZINFECTANT INSTRUMENTAR este o soluție concentrată, cu proprietăți detergente și dezinfectante, fără aldehide, cu un spectru larg de acțiune biocidă creat în funcție de reglementările normelor armonizate europene privind dezinfecția. Se indică pentru dezinfectarea, presterilizarea și curățarea tuturor instrumentelor din domeniul medical și spații private.

Mod de utilizare: soluție concentrată pentru uz profesional. Se diluează la 2%, adică 20 ml produs la 1 l de apă, instrumentarul se curăță, apoi se imersează în soluția preparată, timpul de contact fiind de minimum 5 minute, după care se clătește cu apă curentă. În funcție de gradul de murdărie se prepară soluția cel puțin o dată pe zi. Se poate utiliza în cuvele cu ultrasunete.

PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE:

SR EN 14476 + A1: virucid: 5 min.

SR EN 13727: bactericid: 5 min.

SR EN 13624: fungicid: 5 min.

SR EN 14348: micobactericid: 10 min.

Nr. Lot...../Data Fabricației:

Expiră : 3 ani de la data fabricației.

Producător: S.C. STERYL-ECO SRL

Șos. București – Alexandria 544 – Oraș Bragadiru, Județ Ilfov

J23/3025/2011; CUI: RO29359178 ; Tel: 021 448 14 99 ; Fax: 021 448 14 87 ; email:

office@klintensiv.com ; web : www.klintensiv.com

Precauțiuni de utilizare:

H302 - Nociv în caz de înghițire

H318 - Provoacă leziuni oculare grave

H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală

H400 - Foarte toxic pentru mediul acvatic

H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceapa/vaporii/spray-ul.

P262 - Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

P273 - Evitați dispersarea în mediu.

P280 - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.



Atentie !