

## ETICHETA PRODUSULUI

### KLINTENSIV DEZINFECTANT SUPRAFEȚE

#### COMPOZIȚIA CHIMICĂ la 100 g produs :

##### Substanța activă:

0,34 Clorură de didecildimetilamoniu – nr. CAS 7173 – 51 – 5 (Concentrație produs 50%)

0,09 Compuși de amoniu cuaternar, benzil-C12-18-alchil-dimetil, cloruri – nr. CAS 68391 – 01 – 5 (Concentrație produs 50%)

**Alte ingrediente:** surfactant nonionic, surfactant amfoter, parfum, agent de chelatizare și apă.

#### Număr aviz sanitar: 2266BIO/02/12.24

KLINTENSIV DEZINFECTANT SUPRAFEȚE este o soluție dezinfectantă, fără alcool, gata de folosire, recomandată pentru suprafețe delicate și opacizante, sensibile la atacul chimic al soluțiilor cu bază alcoolică. Este o soluție ideală pentru dezinfectarea rapidă, cu efect maxim asupra suprafețelor, scaune de tratament, suprafețele uniturilor dentare, piese de mână (turbină, contraunghi, piesă dreaptă), brațe de susținere a lămpilor, instrumente stomatologice de oțel, aluminiu, cupru, silicon sau cauciuc, suprafețe de lucru și obiectelor de inventar din spații private și zone de sănătate publică. Este o soluție cu proprietăți detergente și dezinfectante, fără aldehide, cu un spectru larg de acțiune biocidă, creat în funcție de reglementările normelor armonizate europene privind dezinsecția. Substanțele active sunt sărurile cuaternare de amoniu.

**Mod de utilizare:** se pulverizează lichidul KLINTENSIV DEZINFECTANT SUPRAFEȚE direct pe zona care trebuie dezinfectată, distribuindu-se uniform pe întreaga suprafață și pe obiecte și se lasă să acționeze 5 minute. Dacă este necesar, se poate utiliza pentru curățare o bucată de material textil nețesut. Nu se clătește.

#### PROPRIETĂȚI MICROBIOLOGICE:

SR EN 14476: virucid: 5 min.

SR EN 1276; 13727: bactericid: 5 min.

SR EN 1650; 13624: fungicid: 5 min.

SR EN 14348: micobactericid: 5 min.

Conținut: 750 / 1000ml e

Nr. Lot...../Data Fabricației:.....

Expiră : 3 ani de la data fabricației.

Producător: S.C. STERYL-ECO SRL

Șos. București – Alexandria 544 – Oraș Bragadiru, Județ Ilfov

J23/3025/2011; CUI: RO29359178 ; Tel: 021 448 14 99 ; Fax: 021 448 14 87 ; email: [office@klintensiv.com](mailto:office@klintensiv.com) ;

web : [www.klintensiv.com](http://www.klintensiv.com)

#### Precauțiuni de utilizare:

H302 – Nociv în caz de înghițire

H336 – Poate provoca somnolență sau amețelă

H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic

P261 – Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P273 – Evitați dispersarea în mediu.

P301+P312 În caz de înghițire: sunați la un centru de informare toxicologică sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

P305 + P351 + P338 – În caz de contact cu ochii clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.



Atentie !